



Стулья для ванн
BS Bench, BS Seat
Сиденья для ванн
BS Standart, BS Twist



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	5
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	5
2.1 Важные предупреждения.....	5
2.2 Порядок работы.....	5
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	7
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	9

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик стульев и сидений для ванн BS Bench, BS Seat, BS Standart, BS Twist.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Стулья и сиденья для ванн помогают людям с нарушенной координацией движения более удобно принимать водные процедуры, полностью безопасны и комфортны.

1.2 Технические характеристики

Стул для ванны BS Bench.

- Алюминиевый каркас с порошковым напылением, устойчив к коррозии.
- Возможность установки в различные по ширине ванны.
- Сиденье изготовлено из гигиенического, ударопрочного пластика.
- Сиденье и спинка имеют отверстия для отвода воды.
- Регулируемая высота сиденья.
- Ножки для установки на ванну с противоскользящими наконечниками.
- Широкое сиденье для удобной пересадки в ванну или душевую.
- Съёмная спинка с возможностью перестановки для пересадки.
- Съёмный поручень.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

Стул для ванны BS Seat.

- С U-образным гигиеническим вырезом.
- Каркас изготовлен из анодированного алюминия, устойчив к коррозии.
- Сиденье и спинка изготовлены из гигиенического, ударопрочного пластика.
- Сиденье имеет отверстия для отвода воды.
- Ножки для установки на ванну с противоскользящими наконечниками.

- Регулируемая высота сиденья.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

Сиденье для ванны BS Standart.

- Каркас изготовлен из алюминия с порошковым напылением.
- Сиденье изготовлено из гигиенического, ударопрочного пластика.
- Сиденье имеет отверстия для отвода воды.
- Высота сиденья - 22 см относительно высоты края ванны.
- Ножки с противоскользящими наконечниками.
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев.

Сиденье для ванн BS Twist.

- С поворотным механизмом для удобной пересадки.
- Каркас изготовлен из анодированного алюминия.
- Сиденье и спинка изготовлены из гигиенического, ударопрочного пластика.
- Сиденье и спинка имеют отверстия для отвода воды.
- Сиденье оснащено дополнительными противоскользящими фиксаторами.
- Ножки для установки на края ванны с противоскользящими наконечниками.
- Шаг поворота вокруг оси: 90°
- Производство: Китай.
- Гарантия: 6 месяцев

1.3 Упаковка

В комплектации: сиденье, ножки (кроме BS Twist, BS Standart), спинка (кроме BS Twist, BS Standart), руководство по эксплуатации.

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все ножки надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на стул не должна превышать 115 кг.

2.2 Порядок работы

BS Seat

1. Проверьте все детали.
2. Соберите ножки изделия.
3. Присоедините ножки изделия к раме сиденья.
4. Прикрепите спинку к сиденью.

BS Twist

1. Поставьте изделие на ванну, рама изделия должна опираться на обе стороны ванны, держите изделие в равновесии.
2. Завинтите удерживающие рейки. Убедитесь, что они находятся напротив стенок ванны. Изделие должно быть прочно зафиксировано.
3. Если вы хотите поменять направление сиденья, необходимо поднять или опустить подъемный рычаг, а затем повернуть сиденье, куда вам необходимо.

BS Standart

1. Поставьте сиденье на ванну и убедитесь, что оно плотно держится за ванну, трубы должны опираться на обе стороны ванны.

BS Bench

1. Поставьте ножки изделия на пол ровно. Убедитесь, что отверстия на ножках находятся на одинаковом уровне.
2. Зафиксируйте ручки стула винтами.
3. Установите раму сиденья между ножками и зафиксируйте длинными винтами.
4. Повторите те же действия с другой стороной.
5. Прикрепите спинку к раме спинки с помощью длинного винта.
6. Поставьте изделие на стол для того, чтобы собрать сиденье. Затяните винты. Отверстия, находящиеся дальше всего от ножек сиденья должны быть затянуты короткими винтами.
7. Соедините раму спинки с рамой сиденья с помощью длинных винтов.

3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Стулья и сиденья для ванн BS Bench, BS Seat, BS Standart, BS Twist

Производитель: Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd, Китай

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

* *Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО "СИМС-2"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принимающих декларацию о соответствии
Зарегистрировано Филiaal № 2 Московской регистрационной палатой 15 апреля 1999 года,
ОГРН 1027739438902

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
ул. Новопоселковская, дом 6, г. Москва, 125363, телефон (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, E-mail
info@sims2.ru

адрес, телефон, факс
в лице генерального директора С. П. Бадаляна
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами серии BS: сиденья для ванны, стулья для
ванн: I. Сиденья для ванн: BS Standart, BS Twist, II. Стулья для ванн: BS Seat, BS Bench.

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация
Серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора контракта, накладная)
Изготовитель Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd.
Xingxian Development Zone., Changhongling Industrial Park, (2nd period), Dali, Nanhai District, Foshan
City, Китай, 528234. Тел. +86-757-81821201, +86-757-81821202, +86-757-81821203

Код ОК 005-93 (ОКП): 94 5100

Код ТН ВЭД России: 9401 80 000 9

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50444-92 (Рр, 3, 4), ГОСТ Р 51632-2000

обязательных нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании
Протокол испытаний № 12.1636ПТИ/2011 от 13 июля 2011 года Испытательный лабораторный
центр ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России, рег. № РОСС RU.0001.21ИМ33
Протокол испытаний № 5472.011 от 13 июля 2011 года Испытательный лабораторный центр ФГУ
"НИИ ФХМ" ФМБА России, рег. № РОСС RU.0001.21ИМ33
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10857 от 31 октября 2011 года, срок действия не
ограничен

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации
Дата принятия декларации: 25.07.2012

Декларация о соответствии действительна до: 25.07.2015

М.П. «СИМС-2»
«SIMS-2»

подпись

Генеральный директор
С. П. Бадалян

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭНЕРГИЯ ПЛЮС"

наименование и адрес органа по сертификации (при наличии подразделения)
Ул. Сосновая аллея, д. 6, офис 6, г. Королев, Московской обл., 141075, тел. /факс (495) 502-888-1, 502-888-2,
502-888-9, http://www.1011455.ru
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 25.07.2012, **регистрационный номер декларации** РОСС CN.ИМ25.Д07501

М.П.



подпись

Н.П. Шандова

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

№ 003350

Для заметок